

Slangetjes CloudCuddle-frame vervangen


Werkvolgorde

- A. Oude slangetje verwijderen
- B. Lossen onderdelen bewaren (kousjes en clip).
- C. Nieuw slangetje plaatsen
 1. aan linker ventiel bevestigen.
 2. onderdelen over slangetje schuiven.
 3. aan rechter ventiel bevestigen.



extra nodig: tangetje

A. Stap voor stap – oude slangetje verwijderen

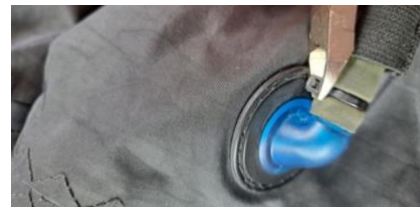


1. Schuif links en rechts het kousje bij 't uiteinde opzij. Daaronder ziet u een tie-wrap.

2. Pak een tangetje en knip de tie-wrap door.



3. Verwijder de tie-wraps en

trek het slangetje los van de ventieltjes.

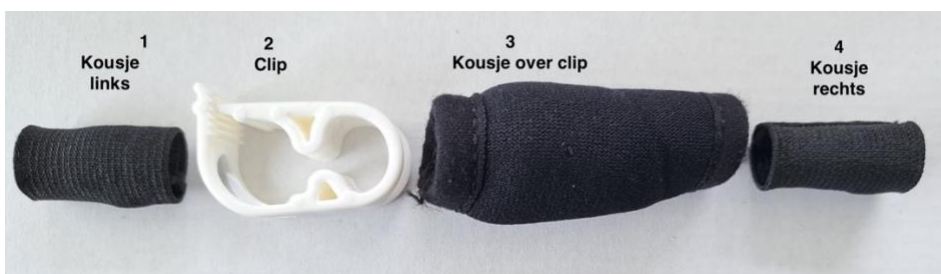

- B. Schuif de losse onderdelen van het slangetje en bewaar deze zorgvuldig. Plaats ze in bovenstaande volgorde terug.

C. Stap voor stap – nieuw slangetje plaatsen



1. Schuif het slangetje zover mogelijk over het het ventiel - tot de opstaande rand – zie pijl. (zo nodig met zeepsop, dat schuift makkelijker).



Zet vast met tie-wrap en knip deze zo kort mogelijk af.



2. Schuif kousje (1) over het slangetje en trek deze over de tie-wrap.



3. Schuif clip + kousje (3) over het slangetje en sluit de clip.



trek het kousje (2) over de clip



en maak de clip dan weer open.



5. Schuif kousje (4) over het slangetje



en schuif het slangetje over het rechter ventiel.



7. Maak de tie-wrap vast



en knip deze kort af.



8. Trek het kousje (4) erover heen.



Klaar!!